



***Novos avanços,
Alta Precisão***

DIRUI BF-7200Plus

Sistema Automático de Hematologia

Diferencial de 6 partes

Análise de Granulócitos imaturos (IG)
Contagem de Eritroblastos (NRBC)


Análise de plaquetas por dois métodos
(Impedância e Óptico)



kal:lab

Plataforma avançada ❖

- Análise do ácido nucleico por citometria de fluxo fluorescente com laser semiconductor e foco hidrodinâmico

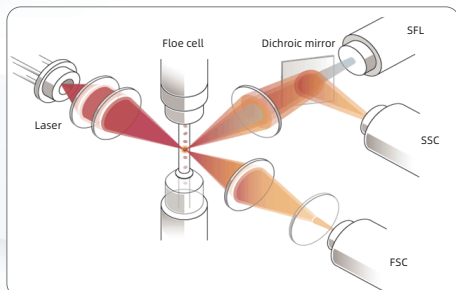

Luz fluorescente lateral (SFL)

- Conteúdo de ácidos nucleicos celular


Dispersão lateral (SSC)

- Estrutura interna da célula

Dispersão frontal (FSC)

- Informação sobre o volume celular


A plataforma avançada realiza a análise do gráfico de dispersão do canal RET e da intensidade de fluorescência alta, média e baixa da região através da permeação do corante fluorescente na célula e da ligação ao material de ácido nucleico, para obter 7 parâmetros RET (RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RHE).

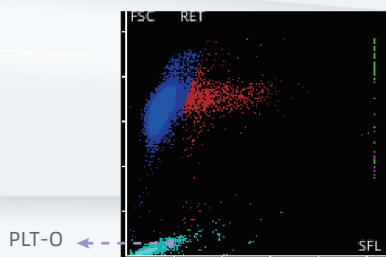

Uma vez que a diferença entre o PLT-O no canal RET e o PLT medido pelo método de impedância seja considerada muito grande, o software emitirá um alarme de aviso, o que pode reduzir efetivamente a interferência causada pela aglutinação de plaquetas, plaquetas grandes, detritos celulares e outros fatores na contagem de PLT.

Múltiplos Modos de Teste ❖

- 5 modos de análise de amostra e 5 modos de teste podem ser escolhidos livremente
- Modo de fluido corporal

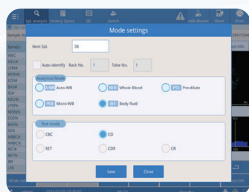


Modo de análise: Modo automático de sangue total, modo pré-diluído, Modo micro-ST (Sangue Total), Modo de fluido corporal
Modo de detecção: CBC, CBC+DIFF, RET, CBC+DIFF+RET, CBC+RET

Item	Unit	Result	Normal	Unit
WBC	10 ⁹ /L	4.2	4.0-10.0	10 ⁹ /L
TC	10 ⁹ /L	4.2	4.0-10.0	10 ⁹ /L
PLT	10 ⁹ /L	4.2	4.0-10.0	10 ⁹ /L
MPV	fL	4.2	4.0-10.0	fL
RDW	%	4.2	4.0-10.0	%
PDW	%	4.2	4.0-10.0	%
RDW-CV	%	4.2	4.0-10.0	%

Realiza teste de fluido corporal fornecendo 7 parâmetros reportáveis (WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF)


Novo Avanço ❖

- Função de verificação automática

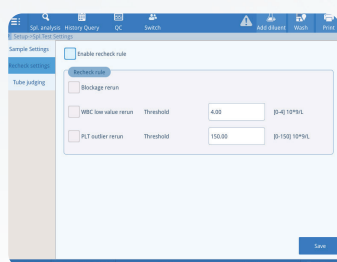


Quando a função de verificação automática está habilitada, a amostra será automaticamente verificada novamente quando os valores de contagem de PLT e WBC estiverem abaixo do limite estabelecido para reduzir a taxa de microscopia

● Função para detecção de valores baixos de WBC

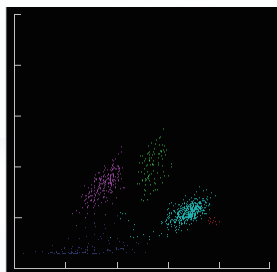

Modo de sangue total

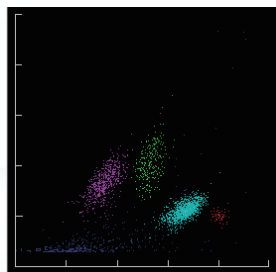


Modo de baixo WBC

Em caso de baixo valor de WBC, automaticamente triplicará o número de partículas para garantir a precisão da contagem baixa de glóbulos brancos

Combinações flexíveis



- Combinação livre de 1 a 4 módulos, a velocidade de medição pode chegar a 480 testes por hora, atendendo aos requisitos de laboratórios de médio e grande porte para testes em grande volume.
- Suporta bandeja de pré-armazenamento e coleta, expandindo as posições de amostras para até 520, melhorando a eficiência dos testes em lote.
- Capacidade de integrar ao equipamento de processamento de Lâmina BSP 800

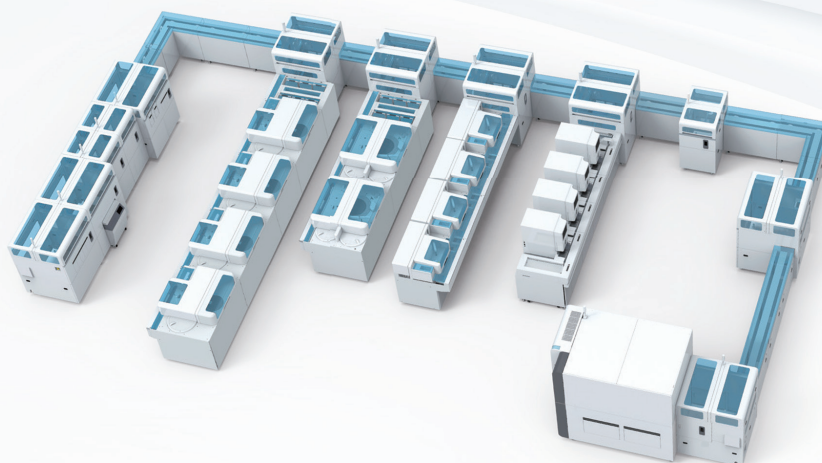

Conectando ao Sistema de Processamento de Amostras LA-60 (automação completa do laboratório), o BF-7200Plus pode oferecer uma análise mais inteligente.

BF-7200Plus

Sistema Automático de Hematologia



Especificação Técnica

Parâmetros - 44 totais, incluindo reticulócitos

37 parâmetros reportáveis + 5 diagramas + 2 histogramas:

WBC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#, **IG#, IG%**, RBC, HGB, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, **NRBC%, NRBC#**, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RHE, IPF, PLT-O

7 parâmetros de fluidos corporais + 1 diagrama de dispersão + 1 histograma:

WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF

29 parâmetros de pesquisa:

HFC#, HFC%, PLT-I, PLT-O, WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR%, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, PDW-SD, BA-N#, BA-N%, NEU#, NEU%, LYMP#, LYMP%, BA-D#, BA-D%

Princípio de Teste

Colorimetria livre de cianeto para teste de HGB

Método de impedância para teste de RBC e PLT

Citometria de fluxo por semiconductor a laser para teste de WBC, RET, NRBC

Contagem de plaquetas realizada por dois métodos: Impedância e Óptico

Amostra

Abastecimento contínuo de 50 amostras através de 5 racks com 10 posições cada

Tubo primário homogeneizado por inversão

Alarmes

Ausência de reagentes ou reagente expirado

Rendimento

CBC+DIFF: 120 amostras / hora

CBC+DIFF+RET: 83 amostras / hora

BF: 40 amostras / hora

Sistema de Dados

Interface bi-direcional via rede RJ45, USB,

conectado a LIS/HIS com query

Tela touch screen

Leitor externo de código de barras para reagente

Armazenamento de 500.000 resultados

Software em português

Controle de qualidade para hemograma completo (reticulócitos e líquidos corpóreos)

Monitor de 18 polegadas e CPU integrados

Medidas

Dimensão: 620mm x 835mm x 770mm

Peso: 86kg

kal:lab

DIRUI

KALLABMED- BIOTECH LTDA

Avenida Pacaembu, nº 1.261, bairro Pacaembu, CEP: 01234-001

www.kallab.com.br • sac@kallab.com.br • +55 11 99217-8407



Certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003



SAC

• Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.